


## Skötselanvisningar för Remmermasken® med huvudband

- Patienten instrueras vid inprovningstillfället om handhavandet av mask och bandkonstruktion samt övriga delar.
- Förpackningen innehåller en personligt gjord näsmask och tillhörande bandkonstruktion.
- Bandet kan bestå av ett enkelt huvudband eller av mer avancerade alternativ. Hakband kan förekomma som alternativ eller komplement.
- I förpackningen finns också rengöringsborstar för näsmasken.
- Materialet i masken är ett ljushärdande uretan-dimetakryl och slangarna av silikongummi.
- Bandet är av syntetiskt material och resåren av lycra eller omspunnet gummi.
- Masken rengörs med flytande diskmedel och mjuk borste, något annat rengöringsmedel får inte användas, beroende på att det kan skada materialet. Finns behov av desinfektion får isopropanylalkohol användas. De medföljande borstarna kan användas till rengöring av maskens kanaler. Banden är också försedda med tvättråd.
- Ingående delar får inte bytas ut mot andra än av producenten godkända delar. Till masken kan tillkopplas alla på den svenska marknaden förekomande CE-märkta hemrespiratorer och apparater av bi-leveltyp, volym som tryckstyrda.
- Systemet uppfyller kraven enl. SFS:1993:584

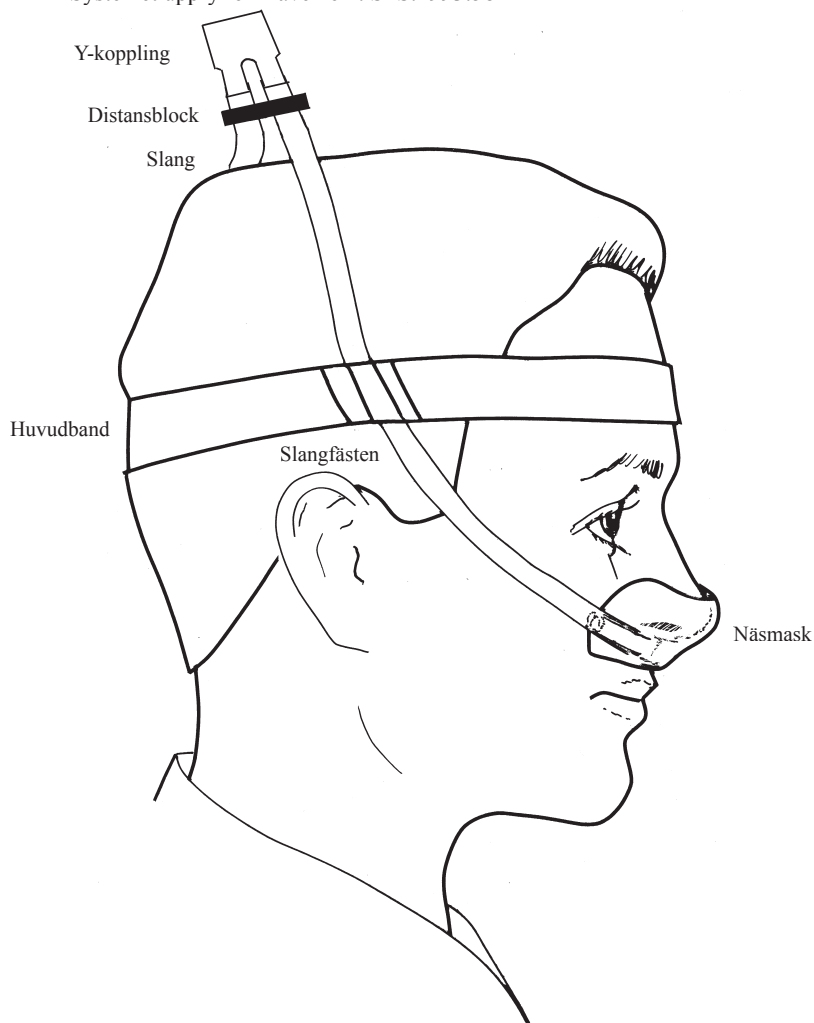

## Utlämnat material

Näsmask \_\_\_\_\_

Extra mask \_\_\_\_\_

Extra band \_\_\_\_\_

Flex tub \_\_\_\_\_

Y-koppling \_\_\_\_\_

Adapter \_\_\_\_\_

Wisper-swivel \_\_\_\_\_

Silikonslang 7X10 VWR int.

Kvalitet, lab.

Övrigt \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Patient \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Masktyp \_\_\_\_\_

Färg på mask \_\_\_\_\_

Bandsort \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bandfärg \_\_\_\_\_